



## BOLETIM TÉCNICO TECPON BG 04

**1. APRESENTAÇÃO:** Tecpon BG 04 é um detergente desinfetante indicado para limpeza e desinfecção de superfícies fixas, equipamentos e produtos médicos não críticos, podendo ser utilizado em áreas críticas. Produto eficiente quanto aos microorganismos Salmonella Enterica, Staphylococcus Aureus e Pseudomonas Aeruginosa.

**2. MODO DE USAR:** Diluir em água fria ou morna na diluição de 0,25%, ou seja, 2,5ml de produto para 1 litro de água, deixando agir por 10 minutos. Para desinfecção de superfícies fixas: Aplicar o produto deixando em contato com 10 minutos. Enxaguar se necessário (superfícies que tenham contato com a pele enxaguar). Para desinfecção de artigos não críticos: Lavar os artigos e deixá-los em imersão por 10 minutos. Os equipamentos que não puderem ser imersos, deverão ter as superfícies mantidas úmidas com o produto, por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos/equipamentos. Utilizá-los o mais breve possível.

### 3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Componente ativo: Cloreto de Poli (Hexametilenoiguanida) , Sinergista (Quartenário de Amônio), Alcalinizante, Solventes, Tensoativo não iônico, Tensoativo Catiônico, Veículo.

### 4. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS:

**Cor:** incolor

**Estado Físico:** Líquido

**pH concentrado:** 7,5 – 8,5

**Densidade:** 1,00 g/ml (+/-0,05)

### 5. PRECAUÇÕES:

- Antes de usar leia as instruções do rótulo;
- Conserve o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem vazia;
- Ao utilizar o produto, use sempre EPI's (óculos e luvas);
- Evite o contato prolongado com a pele;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância;
- Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo.

### 6. PRECAUÇÕES DE USO:

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto, são fornecidas separadamente na **Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ)**.

### 7. QUÍMICO RESPONSÁVEL:

N.M.Battastini - CRQ 05200204 – RS

### 8. REGULAMENTAÇÕES:

Produto Registrado na Anvisa M.S. N° 317800056

### 9. MAIORES INFORMAÇÕES:

Consulte o seu representante TECPON ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-5105377  
e-mail: [tepon@tepon.com.br](mailto:tepon@tepon.com.br) - Endereço: Rua Nelson Teichmann, 275 CEP: 94930-510

### 10. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:

2 anos

CÓDIGO	REV.	DATA	PAG.	APROVAÇÃO	LIBERAÇÃO
495	7	16/10/17	1	Roberta Christo Depto Garantia da Qualidade	Newton Battastini Químico Responsável