



BOLETIM TÉCNICO PROTEX HOSP

1. APRESENTAÇÃO:

PROTEX HOSP é uma emulsão lubrificante livre de óleo de silicone, baseado em óleos minerais, neutro. Lubrifica os instrumentos, protegendo contra ferrugem e oxidação.

2. MODO DE USAR:

Utilizar puro antes da esterilização, deixando-o sobre o instrumento sem enxaguar. Pode ser utilizado em termodesinfectoras e auto-claves.

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

* Tensoativo Aniônico

* Óleo mineral

* Umectante

* Neutralizante

Componente Ativo: Óleo mineral Porcentagem: 5-10%
Tensoativos aniônico Porcentagem: 1-3%

4. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS:

Estado: Líquido Viscoso

Coloração: Branco

pH solução 1%: 8,50 – 9,50

Densidade: 1,000 g/cm³ (+/-0,05)

5. PRECAUÇÕES:

- Antes de usar leia as instruções do rótulo;
- Conserve o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem vazia;
- Ao utilizar o produto, use sempre EPI's
- Evite o contato prolongado do produto puro com a pele;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância;
- Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo.

6. PRECAUÇÕES DE USO:

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto, são fornecidas separadamente na **Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ)**.

7. QUÍMICO RESPONSÁVEL:

N.M.Battastini - CRQ 05200204 - RS

8. MAIORES INFORMAÇÕES:

Consulte o seu representante TECPON ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-5105377
e-mail: tecpon@tecpon.com.br Endereço: Rua Nelson Teichmann, 275 CEP: 94930-510

9. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:

2 anos

CÓDIGO	REV.	DATA	PAG.	APROVAÇÃO	LIBERAÇÃO
222	5	01/04/16	1	Roberta Christo Depto Garantia da Qualidade	Newton Battastini Químico Responsável