



BOLETIM TÉCNICO TECPON PRÉ LIMPEZA

1. APRESENTAÇÃO:

TECPON PRÉ LIMPEZA é um produto utilizado para limpeza instantânea antes da higienização dos equipamentos. Não deixa a matéria orgânica secar, facilitando a limpeza e higienização posterior nos equipamentos. É indicado para uso em blocos cirúrgicos, centro de endoscópios e outros locais onde a limpeza dos artigos cirúrgicos não é realizada imediatamente após o uso. Mantém os artigos contaminados envoltos pela espuma, evitando a exposição de matéria orgânica.

2. MODO DE USAR:

Pulverizar a espuma sobre os equipamentos e deixar até o processo de higienização. Enxaguar o instrumental antes do processo de higienização.

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

- * Ácido Dodecil Benzeno Sulfônico
- * Neutralizante
- * Estabilizante
- * Solvente
- * Corante
- * Fragância
- * Conservante
- * Alcalinizante
- * Veículo

4. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS:

pH concentrado: 7,5 – 8,5

Estado Físico: Líquido azul

Densidade: 1,00 g/ml +/-0,05

5. PRECAUÇÕES:

- Antes de usar leia as instruções do rótulo;
- Conserve o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem vazia;
- Ao utilizar o produto, use sempre EPI's
- Evite o contato do prolongado do produto puro com a pele;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância;
- Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo.

6. PRECAUÇÕES DE USO:

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto, são fornecidas separadamente na **Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ)**.

7. REGULAMENTAÇÕES:

Produto Notificado na ANVISA/ MS = 25351.778354/2011-75

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL:

N.M.Battastini - CRQ 05200204 - RS

9. MAIORES INFORMAÇÕES:

Consulte o seu representante TECPON ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-5105377
e-mail: tecpo@tecpo.com.br Endereço: Rua Nelson Teichmann, 275 CEP: 94930-510

10. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:

2 anos

CÓDIGO	REV.	DATA	PAG.	APROVAÇÃO	LIBERAÇÃO
424	7	21/02/2018	1	Roberta Christo Depto Garantia da Qualidade	Newton Battastini Químico Responsável