



BOLETIM TÉCNICO ENZI-TEC EXTRA

1. APRESENTAÇÃO: ENZI-TEC EXTRA é um limpador que associa a eficiência de 4 enzimas para reduzir a matéria orgânica presente nos artigos. Através da sua ação proteolítica superior em associação com as demais enzimas e tensoativos, Enzi-Tec Extra atua em limpeza manual ou automatizada dissolvendo matérias orgânicas mesmo em locais de difícil acesso, como por exemplo, em canulados, endoscópios e fibroscópios. Indicações de Uso: limpeza de instrumental médico-cirúrgico, endoscópios e artigos odontológicos.

2. RECOMENDAÇÕES DE USO: Para limpeza automatizada: Diluir 1 ml do produto em sua para tempo de imersão de 2 minutos, com temperatura recomendada de 40 C° a 55 C°. Para limpeza manual: Diluir 1 ml de ENZI-TEC EXTRA por litro de água para tempo de imersão de 5 minutos com temperatura recomendada de 30 C° a 40 C°. Após a imersão enxaguar os instrumentos com água em abundância. Siga as instruções de uso de seu equipamento. Para temperatura ambiente o tempo de imersão dever ser validado de acordo com o protocolo de limpeza do hospital.

IMPORTANTE: A solução enzimática não pode ser misturada com agentes oxidantes. (Ex. Soluções contendo iodo).

A água utilizada no preparo da solução deve ser purificada (pH 5,0-7,0, condutividade <4,3 µS/cm, e dureza máx.50ppm (mg/L CaCO₃). Seguir também Resolução RDC nº 15/2012 (ANVISA) Art.68.

UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO. A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA PODE PROVOCAR A PERDA DA EFICIÊNCIA.

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

- Protease, Amilase, Carbohidrase, Lipase, 5% (p/p) Tensoativo não- iônico (Polipropilenoglicol Etoxilado 20% EO), Estabilizantes, Atenuador de espuma, Solventes, Sequestrante, Corante e Veículo.

- Atividade enzimática: Atividade Proteolítica Min.: 0,04 UP.mL .min.

Atividade Amiolítica Min.: 0,05 UA.mL Min.

4. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS:

pH puro: 6,0 – 8,0

Densidade: 1,00 g/ml (+/-0,05)

Aspecto: Líquido

Coloração: amarelo

5. PRECAUÇÕES:

- Antes de usar leia as instruções do rótulo;
- Conserve o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem vazia;
- Ao utilizar o produto, use sempre EPI's (óculos e luvas);
- Evite o contato prolongado com a pele;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância;
- Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo.

6. QUÍMICO RESPONSÁVEL:

N.M.Battastini - CRQ 05200204 – RS

7. REGULAMENTAÇÕES:

Produto Registrado na ANVISA/ MS Nº 317800054

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL:

N.M.Battastini - CRQ 05200204 – RS

9. MAIORES INFORMAÇÕES:

Consulte o seu representante TECPON ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-5105377

e-mail: tecpon@tecpon.com.br - Endereço: Rua Nelson Teichmann, 275 CEP: 94930-510

10. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:

2 anos

CÓDIGO	REV.	DATA	PAG.	APROVAÇÃO	LIBERAÇÃO
581	1	01/04/16	1	Roberta Christo Depto Garantia da Qualidade	Newton Battastini Químico Responsável