



Peroxide P35®

Desinfetante esterilizante hospitalar especial para máquinas de hemodiálise

Características

Peroxide P35® é um produto de uso profissional, constituído de mistura equilibrada de Ácido Peracético, Peróxido de Hidrogênio, Ácido Acético, e Oxigênio Ativo, em veículo estabilizado desenvolvido para desinfecção e esterilização hospitalar em geral e, especialmente, indicado para a desinfecção química de máquinas de hemodiálise, bem como apresenta alta efetividade na remoção de depósitos de Carbonato de Cálcio, Magnésio e resíduos orgânicos.

Propriedades Físicas

Aspecto	Líquido incolor
Oxigênio Ativo	6,7 - 7,2% em peso
Ácido Peracético	Min. 3,5% em peso
Peróxido de Hidrogênio	Min. 11,0% em peso
Ácido Acético	Max. 15,0%
Veículo estabilizante	Q.S.P. 100%
Densidade à 20 °C	Aprox. 1,1 g/cm ³
Solubilidade	miscível com água em qualquer proporção e solventes orgânicos polares (Ex.: Álcoois)



Estabilidade Térmica

Ponto de Fulgor (vaso fechado)	Não aplicavel
Ponto de Congelamento	Aprox. -25 °C
Flamabilidade	Não e combustível
Temperatura recomendada de armazenagem	-12 °C à +35 °C
Temperatura máxima de transporte	40 °C



Aplicação e Dosagem

Peroxide P35® é um agente bactericida, fungicida, viruscida (inactiva o vírus HBV), eficaz contra um amplo espectro de microrganismos (inclusive esporulados), que age pelo efeito poderoso de oxidação, sendo decomposto após aplicação, e não deixando resíduos biologicamente incompatíveis com o meio ambiente. Reduz pirogénios. Dissolve resíduos de sangue.

Utilizar em máquinas de hemodiálise com sistema de mistura proporcional. **Peroxide P35®** é misturado com água numa proporção de 1:34, resultando numa concentração de uso contendo 0,1% de Ácido Peracético. **Peroxide P35®** deve ser utilizado pela linha de entrada do esterilizante. O tempo de ação é de 15 minutos. Enxaguar a seguir até que o nível residual verificado na mangueira de entrada do dialisador esteja em níveis recomendados.



Composição

100g de **Peroxide P35®** contém Ácido Peracético (mínimo 3,5g), Peróxido de Hidrogênio e Ácido Acético, veículo estabilizante q.s.p..

Embalagem

Frascos plásticos contendo 5 litros.

Validade

A validade do **Peroxide P35®** é de 6 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em condições adequadas.

Registro

Produto registrado em órgãos subordinados ao Ministério da Saúde.

Assistência Técnica

A **Bell Type®** está à sua disposição para orientações, na utilização do **Peroxide P35®**. Consulte-nos.

Bell Type® e Peroxide® são marcas registradas da©2008 Bell Type Industries Ltda. Todos os direitos reservados

