



BOLETIM TÉCNICO TECPON CLEAN

1. APRESENTAÇÃO: É um detergente levemente alcalino formulado especialmente para uso em lavadoras automáticas, termodesinfectoras e máquinas de ultrassom. Pode também ser utilizado em limpeza manual de instrumentais. Não ataca metais, borrachas, plásticos ou tubos corrugados. Não deixa resíduos após o enxágue, não espumante e não corrosivo. Digere e dissolve sangue, tecidos e qualquer outro resíduo de todas as partes internas e externas dos instrumentos, sem agredir qualquer material componente do mesmo. Auxilia na revitalização dos instrumentais. Isento de hidróxido de sódio (soda cáustica).

2. RECOMENDAÇÕES DE USO: Limpeza manual: 1 ml para cada litro de água, com temperatura ambiente ou até 70°C, logo após submergir os instrumentos a serem limpos. Deixar em contato com a solução por 5 minutos para remoção integral da carga orgânica, após enxaguar abundantemente com água. Limpeza em equipamentos automáticos: 1 ml para cada litro de água com temperatura de 35° a 70 ° C. Para lavadoras de ultrassom: Adicionar 1 ml para cada litro de água. Deixar em contato com a solução durante 5 minutos. Limpeza de equipamentos cirúrgicos usados em ortopedia (manual): Adicionar 10 ml para cada litro de água.

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

- * Polipropilenoglicol Etoxilado
 - * Alcalinizante
 - * Atenuador de espuma
 - * Corante
 - * Fragância
 - * Água
 - * Contém Álcool Isopropílico 8 – 10%
- Componente Ativo: Polipropilenoglicol Etoxilado

4. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS:

Estado: Líquido

Coloração: Verde

pH sol. 1%: 9,5 – 10,5

pH sol. 0,1%: 7,20 – 8,20

pH sol. 0,2%: 8,0 – 9,0

Densidade: 1,000 g/cm³ (+/-0,05)

5. PRECAUÇÕES:

- Antes de usar leia as instruções do rótulo;
- Conserve o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem vazia;
- Ao utilizar o produto, use sempre EPI's (óculos e luvas);
- Evite o contato prolongado com a pele;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância;
- Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo.

6. PRECAUÇÕES DE USO: Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto, são fornecidas separadamente na **Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ)**.

7. REGULAMENTAÇÕES:

Produto Notificado na ANVISA/ MS = 25351.453358/2010-62

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL:

N.M. Battastini - CRQ 05200204 – RS

9. MAIORES INFORMAÇÕES:

Consulte o seu representante TECPON ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-5105377, e-mail: tecpon@tecpon.com.br - Endereço: Rua Nelson Teichmann, 275 CEP: 94930-510

10. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 2 anos

CÓDIGO	REV.	DATA	PAG.	APROVAÇÃO	LIBERAÇÃO
008	10	29/07/2019	1	Roberta Christo Depto Garantia da Qualidade	Newton Battastini Químico Responsável